

[Menu](#)

Entrega Garantida
em todo o Brasil



Aceitamos todos os
cartões de crédito



Ambiente certificado e
100% Seguro

[INÍCIO](#) / [POWERBREATHE MEDIC KH2](#)[Voltar](#)

O novo POWERbreathe KH2 reúne todas as características do KH1 e traz várias funcionalidades inovadoras, como Pressão Inspiratória Máxima (MIP) e Pico de Fluxo Inspiratório (PIF), permitindo aos profissionais coletar dados de treinamento dos pacientes. Com sua avançada tecnologia os resultados podem ser visualizados em tempo real usando o revolucionário software Breathe-Link Medic.

Características:

- Integrado com o software Breathe-Link
- Medição de Pressão Inspiratória Máxima (MIP) e Pico de Fluxo Inspiratório (PIF)

[+ detalhes](#)**R\$22 900,00**

ou 6x
de
R\$3.816,67
sem
juros
Ver
parcelas

[COMPRAR](#)

PRODUTOS RELACIONADOS



RECEITUÁRIO POWERBREATHE HAB

R\$5,00
ou 1x de R\$5,00

COMPRAR

- Descrição
- Informações Técnicas
- Manual do Usuário
- Avaliações do Produto

Descrição

O **POWERbreathe KH2** é um dispositivo eletrônico de treinamento dos músculos inspiratórios. É indicado para utilização por profissionais de saúde para o treinamento e avaliação dos músculos inspiratórios em pacientes com dispneia (falta de ar), incluindo pacientes com asma, DPOC, bronquite, fibrose cística, enfisema, doenças cardíacas, doenças neuromusculares, doença de Parkinson e lesões na coluna vertebral*.

O **POWERbreathe KH2** é adequado para uso com filtros descartáveis ou para uso por um único paciente em domicílio sob supervisão médica.

O **POWERbreathe KH2** utiliza uma válvula de resposta rápida controlada eletronicamente para criar resistência à inspiração. O treinamento contra essa resistência faz com que os músculos inspiratórios se adaptem, se tornando mais fortes e mais resistentes à fadiga. Isso leva à redução da falta de ar, maior tolerância a exercícios e a uma melhor qualidade de vida. Conforme o paciente respira através do **POWERbreathe KH2**, você nota que ele terá de fazer cada vez mais força para inspirar.

Esse é o efeito do treinamento de resistência agindo nos músculos inspiratórios (especialmente no diafragma e nos músculos intercostais). Durante a expiração não há resistência e o paciente deve expirar normalmente, permitindo que o tórax e os músculos respiratórios relaxem, empurrando naturalmente o ar para fora dos pulmões.

O treinamento de resistência do **POWERbreathe KH2** foi especialmente projetado para se adaptar às mudanças dinâmicas na força do músculo respiratório durante a respiração, e pode se adaptar automaticamente aos aumentos na força do músculo respiratório no início de cada sessão de treinamento. Os resultados são exibidos na tela após uma sessão de treinamento ou avaliação ou em tempo real, através do software **Breathe-Link Medic** para PC fornecido. Os parâmetros fornecidos incluem Pressão inspiratória máxima (cm H2O, média mais alta de 1 segundo), Pico de fluxo inspiratório (L/s), Carga de treinamento (cm H2O), Potência média (Watts), Volume inalado médio (L) e Energia (Joules).

O regime de treinamento do **POWERbreathe KH2** de 30 respirações duas vezes ao dia demora apenas alguns minutos por dia e, se seguido corretamente, trará resultados perceptíveis em apenas algumas semanas.





Informações Técnicas

Contém

- Recarga e carrinho de exposição
- DVD com instruções (Aprox: 35 minutos)
- Espaçador para utilização de filtro
- Clip Nasal
- Bolsa para guardar
- 4 comprimidos de limpeza
- Manual de utilização

Dimensões

- Peso: 0,594 g
- Comprimento: 16 cm
- Largura: 22,5 cm
- Espessura: 8 cm

Manual do Usuário

Como usar

O paciente deve estar relaxado e de pé ou sentado ereto. Instrua o paciente a segurar o dispositivo com a mão envolvendo a seção inferior traseira do dispositivo, com os dedos e o polegar sobre os suportes de borracha colorida. Certifique-se de que a entrada de ar não está obstruída. Agora instrua-o para colocar o dispositivo na boca de forma que os lábios cubram o bocal externo para formar uma vedação, e os blocos do mordedor do bocal estejam presos entre os dentes de cima e de baixo (se estiver usando um filtro

bacteriano, certifique-se de que o paciente está usando os lábios para formar uma vedação hermética com a abertura do filtro).

Avaliações do Produto

Nenhuma avaliação até o momento

PRODUTO: POWERBREATHE MEDIC KH2

• COMENTÁRIO*

• TÍTULO DO SEU COMENTÁRIO*

• APELIDO*

ENVIAR COMENTÁRIO

COMENTÁRIOS DO CLIENTE 0 ITEM(S)

Atendimento

Atendimento

Formas de Pagamento

Formas de Entrega



Institucional

Quem Somos

Depoimentos

Nossos Clientes

Redes Sociais



Mais Vendidos

POWERbreathe Plus Medic

POWERbreathe Plus Heavy Resistance (ESPORTE)

POWERbreathe KH2

K5 POWERbreathe + software Breathe-Link

Powerbreathe Classic Medium Resistance (Fitness)

Contatos

🏠 Rua Aeroporto, 192 - Chácara Marco Barueri - SP - CEP: 06419-260

📞 Telefone: +55 11 3809-8700

✉ E-mail: contato@hablatinamerica.com

NEWSLETTER

Assine e acompanhe nossas novidades e promoções

ASSINAR

Formas de Pagamento

Certificados

© 2022 HAB Latin America. Todos os direitos reservados.

signashop powered by Signa

