

Procure por nome, marca, código...

Bem-vindo
Entre ou Cadastre-se

Lançamentos

Outlet

Fisioterapia

Eletroterapia

Estética

Fitness

Pilates

Móveis

Saúde e Bem-Estar

Reabilitação

[🏠](#) > [Eletroterapia](#) > [Correntes/Multicorrentes](#) > [Corrente Aussie](#)

Neurodyn Multicorrentes Ibramed - Aparelho de Correntes 9 em 1 - 06 Canais

Marca: **Ibramed**

Disponibilidade: Pronta-entrega

[...Veja mais informações](#)

R\$ 2.468,00

em até 12x R\$ 205,67 s/ juros

R\$ 2.344,60 - (5% à vista)

ADICIONAR AO CARRINHO



Retire este produto na loja

Vendido e entregue por ISP Saúde



R\$ 2.344,60 no boleto bancário

5% de desconto



R\$ 2.344,60 em 1x no cartão

5% de desconto

Mais opções de parcelamento ▾

Calcular Frete

90050-170



Usar Minha Localização



ENTREGAS

RETIRE NA LOJA

a partir de 13 de Setembro

Grátis

MELHOR PRAZO

entre 30 de Agosto e 6 de Setembro

R\$ 51,16

MELHOR VALOR

entre 31 de Agosto e 8 de Setembro

Grátis

Fale com um especialista

Olá , Dúvidas sobre Neurodyn Multicorrentes Ibramed , Aparelho de
Correntes 9 em 1 ?

Um de nossos consultores pode te ajudar!

Nome

Telefone





SOLICITAR CONTATO

Descrição do Produto

O Neurodyn é um estimulador neuromuscular transcutâneo completo, com 4 canais para correntes alternadas com controles independentes e 9 correntes: Aussie, Russa, Tens, FES, Interferencial Tetrapolar e Bipolar. Além de 2 canais independentes para os tratamentos com Microcorrente, Corrente Polarizada e Corrente Pulsada de Alta Voltagem (High Volt). O Neurodyn possui 54 protocolos de tratamento pré-programados e 20 opções para salvar seus protocolos particulares, display LCD blue light, teclas Soft Touch e disposição dos parâmetros de forma diferenciada. Este aparelho é ideal para fisioterapia e pode ser utilizado na estética. Compacto, permite fácil transporte e atendimento home care.

Diferenciais e Benefícios

- **Multifuncional:** possui as correntes Aussie, Russa, TENS, FES, Interferencial Bipolar e Interferencial Tetrapolar, Microcorrente, Micropolarizada e Pulsada de Alta Voltagem (High Volt);
- **Canais independentes:** sendo 04 canais para correntes alternadas e 02 canais para Microcorrente, corrente Polarizada e corrente de Alta Voltagem;



viagem,

- **Design moderno e Eficiente:** conta com display LCD Blue Light e teclas Soft Touch;
- **Segurança:** tratamentos não invasivos, não causa dependência e não gera efeitos colaterais;
- **Personalizável:** conta com 54 protocolos pré-programados e 20 protocolos particulares, perfeito para salvar seus próprios protocolos conforme objetivo terapêutico.

Indicações

- **Reabilitação:**
 - Alívio sintomático da dor crônica intratável;
 - Alívio sintomático da dor aguda pós-traumática;
 - Alívio sintomático da dor aguda pós-operatória;
 - Prevenção ou retardo de atrofia por desuso;
 - Reeducação motora;
 - Aumento de torque muscular;
 - Manutenção ou aumento da amplitude de movimento articular;
 - Relaxamento temporário de músculos espásticos;
 - Aumento da circulação sanguínea local;
 - Cicatrização de úlceras e feridas;
 - Cicatrização de lesões pós-trauma ou pós-operatória aguda;
- **Estética:**
 - Redução de edema;
 - Controle da inflamação;
 - Auxilia na cicatrização;
 - Drenagem linfática e vascular;



- Eletroporação e iontoforese;
- Eletrolipólise;
- Gordura localizada;
- Flacidez de pele.

Efeitos fisiológicos

- **Aussie:**
 - Aumento da vascularização;
 - Melhora do tecido conjuntivo devido à eliminação dos detritos toxêmicos;
 - Melhora do aporte de enzimas e nutrientes na corrente sanguínea;
 - Melhora da circulação linfática, eliminando as toxinas;
 - Aumento de flexibilidade Tissular;
 - Tonificação e fortalecimento muscular.
- **Russa:**
 - Despolarização do neurônio motor produzindo contração eficiente no músculo;
 - Efeitos biofísicos: aumenta o metabolismo celular, aumento da oxigenação;
 - Efeitos químicos: liberação de metabólitos;
 - Efeitos mecânicos: dilatação arterial e irrigação sanguínea, aumento do tônus e força muscular.
- **TENS:**
 - Bloqueio da mensagem da dor ao Sistema Nervoso Central (SNC) através da "Teoria das Comportas da Dor", causando analgesia.
- **FES:**
 - Estimula eletricamente os ramos intramusculares dos motoneurônios, ao qual induz à contração muscular.
- **Microcorrente:**



- Aumento das funções de permeabilidade da membrana;
- Aumento da produção de ATP;
- Reorganização de fibras colágenas;
- Aumento da síntese de proteínas;
- Melhoria da captação de oxigênio local;
- Aumento das trocas iônicas;
- Aumento da circulação sanguínea e linfática local;
- Redução do processo infeccioso;
- Aumento da velocidade de síntese dos tecidos de reparo na cicatrização;
- Melhoria da qualidade do tecido cicatricial produzido em queimaduras e demais lesões cutâneas.
- **Interferencial:**
 - Ativação de forma seletiva as fibras nervosas aferentes mielinizadas (fibras nervosas grossas) inibindo ou bloqueando a sensação de dor;
 - Normalização do balanço neurovegetativo, com relaxamento e melhoria da circulação.
- **Polarizada:**
 - Hiperemia e produção de calor;
 - Oxigenação;
 - Aumento da circulação periférica;
 - Nutrição tecidual;
 - Aumento do metabolismo (vasodilatação reflexa);
 - Maior concentração de nutrientes, favorecendo a reparação tecidual;
 - Iontoforese por eletrorrepulsão.
- **High Volt:**
 - Alterações locais no pH;
 - Mudanças eletroquímicas no tecido;



- Recrutamento de fatores antimicrobianos do organismo;
- Angiogênese: estimula a vascularização;
- Melhora da oxigenação e perfusão capilar;
- Eletroporação: aumento da permeabilidade da membrana.

Associações terapêuticas

- **Laserpulse:** o laser possui efeitos analgésicos e de reparação tecidual, que associado às correntes, acelera o processo de recuperação;
- **Sonopulse III:** as correntes possuem efeitos analgésicos e de estimulação, que associado ao Sonopulse, reduz o processo inflamatório e complementa o tratamento, tornando mais eficiente o resultado.

Informações Adicionais

- **Corrente Aussie:** consiste em bursts de curta duração (1KHz - 2ms e 4KHz - 4ms) ideal para flacidez de músculo devido ao sedentarismo, atrofia ou envelhecimento, fortalecimento e tonificação muscular, analgesia e drenagem linfática. Ideal também para lipólise, atuando diretamente nos adipócitos;
- **Corrente Russa:** possui grande poder de contração tanto nas grandes classes musculares quanto nos músculos pequenos. Ideal para fortalecimento abdominal, glúteos e pernas;
- **Corrente TENS:** corrente de baixa frequência, alternada, simétrica e despolarizada. Clássica no tratamento da dor via estimulação sensorial e o estímulo é bem tolerado pelo paciente, mesmo em intensidades elevadas;
- **Corrente FES:** consiste em uma corrente de baixa frequência, alternada, simétrica e despolarizada. É uma corrente de estimulação elétrica neuromuscular, tem como função produzir movimentos funcionais e/ou comprometidos do sistema nervoso;
- **Corrente Interferencial:** corrente de média frequência, corrente alternada, simétrica, pulso retangular ou sinusoidal. É o fenômeno que ocorre quando se aplicam duas correntes de média frequência com amplitude modulada em baixa frequência, especialmente desenvolvido para fisioterapia, ortopedia e reumatologia;
- **Microcorrente:** corrente pulsada com inversão automática de polaridade positiva e negativa a cada 03 segundos. Ideal para processos inflamatórios, na prevenção de lesões e outros.



inflamatórios, pós-operatório, úlceras e outros;

- **Micropolarizada:** é uma corrente pulsada monofásica em microamperes; Sua técnica de aplicação consiste em uma caneta com agulha (polo ativo) e polo dispersivo (placa de alumínio e esponja vegetal); Eficaz nos tratamentos de estrias e rugas;
- **Pulsada de Alta Voltagem (High Volt):** o equipamento gera uma tensão alternada em alguns milhares de volts (baixa corrente) que é aplicada a eletrodos de vidro. O gás quando excitado produz faíscas elétricas, o gás então é ionizado pela alta tensão tornando o bulbo de vidro fluorescente.

Conservação

- Evite locais sujeitos a vibrações;
- Instale o equipamento sobre uma superfície firme e plana;
- Não bloqueie a ventilação;
- Evite ambientes úmidos, quentes e empoeirados;
- Certifique-se que a área em torno do cabo de alimentação está livre;
- Não introduza objetos nos orifícios do dispositivo;
- Faixa de temperatura durante o transporte e armazenamento: 5 - 50° C/ 41 - 122° F.

Contraindicações

- Dispositivo eletrônico implantado;
- Pacientes cardíacos;
- Próteses metálicas;
- Suspeita ou confirmação de gravidez;
- Áreas inflamadas, infectadas ou com lesões cutâneas;
- Cuidado com aplicações em crianças, idosos e epiléticos;



- Pessoas com alteração de sensibilidade superficial;

Itens Inclusos

- 01 Neurodyn Multicorrentes - Ibramed;
- 01 Cabo 83 - laranja: ME01037A;
- 01 Cabo 84 - preto: ME01210A;
- 01 Cabo 85 - azul: ME01036A;
- 01 Cabo 86 - verde: ME01035A;
- 01 Cabo 87 - garras jacaré - laranja: ME01216A;
- 01 Cabo 88 - garras jacaré - preto: ME01214A;
- 01 Cabo 127 High Volt;
- 01 Cabo de alimentação;
- 08 Eletrodo condutivo de borracha 5x3cm;
- 08 Eletrodo condutivo de borracha 5x5cm;
- 04 Cinta elástica para fixação de eletrodos;
- 04 Placa de alumínio 8x7cm;
- 04 Eletrodo esponja 9,5x8,5cm;
- 02 Eletrodo esponja 8x15cm;
- 02 Placa de alumínio 7,5x14cm;
- 01 Bisnaga com gel (100g);
- 01 Fusível 20AG 5A.

Especificações Técnicas

- Neurodyn Multicorrentes - Ibramed;



- Correntes: Aussie, Russa, TENS, FES, Interferencial Bipolar e Tetrapolar, Microcorrente, Corrente Polarizada, e High Volt (HV);
- 04 canais de saída independentes;
- Dimensões: 37x31,5x12,5cm (LxPxA);
- Peso sem acessórios: 2,5kg;
- Alimentação: 100-240V 50/60Hz;
- Potência de entrada: 85VA;
- Intensidade: 0 a 140mA.
- **Aussie:**
 - Intensidade: 0 a 140 mA;
 - Frequência Portadora: 01 ou 4 KHz;
 - Frequência Burst: 01 a 120 Hz;
 - Burst: 02 ou 04 ms;
 - Modo: Contínuo, Sincronizado, Recíproco e Sequencial;
 - Rampas: Rise (1-20s), On (1-60s), Decay (1-20s), Off (1-60s);
 - Timer: 01 a 60 min;
- **Russa:**
 - Intensidade: 01 a 140 mA;
 - Frequência: 2,5 KHz;
 - Frequência Burst: 01 a 100 Hz;
 - Ciclo de trabalho: 10%, 20%, 30%, 40% e 50%;
 - Modo: Contínuo, Sincronizado, Recíproco e Sequencial;
 - Rampas: Rise (1-20s), On (1-60s), Decay (1-20s), Off (1-60s);
 - Timer: 01 a 60 min;
- **TENS:**



- Intensidade: 01 a 140 mA;
- Frequência: 01 a 150 Hz;
- Frequência Burst: 02 Hz;
- Modo: Contínuo, Burst e VIF;
- Rampas: Rise (1-20s), On (1-60s), Decay (1-20s), Off (1-60s);
- Timer: 01 a 60 min;
- **FES:**
- Intensidade: 01 a 140 mA;
- Frequência: 0,5 a 250 Hz;
- Pulso: 50 a 500 us;
- Modo: Sincronizado e Recíproco;
- Rampas: Rise (1-20s), On (1-60s), Decay (1-20s), Off (1-60s);
- Timer: 01 a 60 min;
- **Interferencial Bipolar e Tetrapolar:**
- Intensidade: 01 a 140 mA;
- Frequência: 1, 2, 4, 8 e 10 kHz;
- Frequência Sweep: 01 a 200 Hz;
- Modo Sweep: Off 1/1S, 1/5/1S, e 6/6S;
- AMF: 01 a 200 Hz;
- Modo: Sincronizado e Recíproco;
- Modo Scan: Estático e Automático (10%, 50% e 100%);
- Rampas: Rise (1-20s), On (1-60s), Decay (1-20s), Off (1-60s);
- Timer: 01 a 60 min;
- **Microcorrente:**



- Intensidade: 0 a 990 mA;
 - Frequência: 15 KHz;
 - Polaridade: Positivo, Negativo e Alternada (0,33 Hz);
 - Timer: 01 a 60 min;
 - **Corrente Polarizada:**
 - Intensidade: 0 a 30 mA;
 - Frequência: 15 KHz;
 - Polaridade: Positivo e Negativo;
-
- Timer: 01 a 60 min;
 - **High Volt:**
 - Intensidade: 01 a 400 V;
 - Frequência: 01 a 250 Hz;
 - Modo: Contínuo e Sincronizado;
 - Rampas: Rise (1-20s), On (1-60s), Decay (1-20s), Off (1-60s);
 - Polaridade: Positivo e Negativo;
 - Timer: 01 a 60 min;
 - 54 Protocolos pré-programados e 20 particulares;
 - Potência de Entrada: 50/60 Hz;
 - Voltagem: Bivolt automático.

Ficha Técnica





Dimensões 37x31,5x12,5 cm (LxPxA)

Voltagem Bivolt automático

Terapia Eletroestimulação

Protocolos 54 Programados e 20 Particulares

Canais 06 Canais

Intensidade 0 a 140 mA

Correntes Aussie, Russa, TENS, FES, Interferencial Tetrapolar e Bipolar, Microcorrente (MENS), Micropolarizada, Pulsada de Alta Voltagem

Pesos e Medidas

Dimensões do produto

Dimensões (C x L x A)

37.0 x 32.0 x 9.0 cm



Peso Kg

2.3

Dimensões da embalagem

Dimensões Embalado (C x L x A)

46.0 x 35.0 x 17.0 cm

Peso Embalado Kg

4.6

[!\[\]\(1a0ecb0f44016aa353f6ecdd79a3699d_img.jpg\) Manual completo](#)

Perguntas Frequentes

Quais correntes que o equipamento possui?



É necessário o uso do gel de contato na utilização de quais correntes elétricas?



Os acessórios acompanham o equipamento ou é necessário comprá-los separadamente?



O que é a corrente Aussie?



A corrente Aussie pode ser utilizada para recuperação da função muscular e modulação da dor?



Na modalidade corrente interferencial, como é realizada a interferência e em quais canais?



Combo Aproveite e compre junto



Ibramed

Neurodyn Multicorrentes Ibramed - Aparelho de Correntes 9 em 1 - 06 Canais

Por: R\$ 2.468,00



Gel Condutor Incolor - Sem Álcool - Bag 5kg - RMC

De: R\$ 51,90

Por: R\$ 32,90



Aquecedor de Gel, Óleos e Cremes - 03 Recipientes - Biotron

De: R\$ 508,52

Por: R\$ 499,90



Cabo 83 para Neurodyn Multicorrentes - Cor Laranja - Ibramed

Por: R\$ 72,90

Selecione o(s) produto(s) desejado(s) ao lado para adicionar à sua compra



Aproveite e compre junto

-36%



Gel Condutor Incolor - Sem Álcool -
Bag 5kg - RMC

De: R\$ 51,90
Por: R\$ 32,90

R\$ 30,60 (à vista -7%)



Aquecedor de Gel, Óleos e Cremes
- 03 Recipientes - Biotron

De: R\$ 508,52
Por: R\$ 499,90

R\$ 464,91 (à vista -7%)
12x de R\$ 41,66 sem juros



Cabo 83 para Neurodyn
Multicorrentes - Cor Laranja -
Ibramed

Por: R\$ 72,90

R\$ 69,26 (à vista -5%)
2x de R\$ 36,45 sem juros

Família





TENS VIF 993 Dual Quark –
Aparelho de Corrente Tens – 2

Por: R\$ 1.289,80

R\$ 1.225,31 (à vista -5%)
12x de R\$ 107,48 sem juros



Dualpex 961 Quark - Aparelho de
Correntes Tens, Fes, Russa e

Por: R\$ 3.402,70

R\$ 3.164,51 (à vista -7%)
12x de R\$ 283,56 sem juros



Diapulsi 990 Quark - Aparelho de
Multicorrentes para Fisioterapia

Por: R\$ 2.636,00

R\$ 2.451,48 (à vista -7%)
12x de R\$ 219,67 sem juros

Similares



Neurodyn Compact Ibramed -
Aparelho de Eletroestimulação
Tens, Fes e Russa - 02 Canais

Por: R\$ 1.199,00

R\$ 1.139,05 (à vista -5%)

12x de R\$ 99,92 sem juros



PIX



CARTÃO DE CRÉDITO



BOLETO



DEPÓSITO



FINANCEIRA

Neurodyn II Ibramed – Aparelho de
TENS, FES e Russa – 04 Canais

Por: R\$ 1.299,00

Ajuda € **R\$ 1.234,05** (à vista -5%)

12x de R\$ 108,25 sem juros

Venha Fazer Parte Da Nossa Equipe

Tire Suas Dúvidas Contato

Consulte Suas Dúvidas

Encontre As Nossas Lojas

Compre Pelo Televendas 0800 7070 010

Mapa Do Site

Quem Somos

Seja Um Franqueado

Frete Grátis

Política De Privacidade

Certificados e segurança



EM ANÁLISE
ReclameAQUI

Redes sociais



- Fisioterapeuta RT: Fabiana Fernandes Puga - Crefito13-99509-F - RE000561; 8.13.515-2 - Cirurgiã-Dentista RT: Renata Freitas Pignata Dessen - CROSP-CD-61053 - CRT-477; AFE/ANVISA - Cosméticos: 2.07.259-8 - Fisioterapeuta RT: Elisia Martins Almeida - Crefito10-196784-F - RE001760 | Política de Privacidade e Segurança - Fotos meramente ilustrativas - Os preços e condições da loja virtual estão sujeitos a alterações. Em caso de divergência de preços no site, o valor válido é o do Carrinho de Compras.

